

NÁVOD K POUŽITÍ

Babystart FertilSafe PLUS® lubrikační gel na podporu početí 75 ml (Single pack)

Lubrikant, který je bezpečný pro spermie a vhodný pro všechny páry, které se snaží otěhotnět.

- KLINICKY TESTOVANÝ
- VYVÁŽENÉ pH
- BEZ PARABENŮ

FertilSafe PLUS byl vytvořen firmou Babystart Ltd, která je jedna z předních světových poskytovatelů diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a doplňků stravy pro podporu plodnosti. Naši odborníci vyvinuli lubrikační gel FertilSafe PLUS speciálně pro páry, které se snaží otěhotnět. FertilSafe PLUS byl vyvinut tak, aby napodoboval přirozené prostředí, kterým sperma putuje při cestě k vajíčku. Zvyšuje komfort během pohlavního styku a pomáhá tak při oplodnění. FertilSafe PLUS byl klinicky testován, aby se prokázalo, že není závadný pro spermie a splňuje všecky přísné testy pH a konzistence, která chrání přirozené prostředí pro bezpečí a životaschopnost spermíí.

Prosíme, přečtěte si tyto instrukce před použitím.

Jak funguje FertilSafe PLUS?

FertilSafe PLUS funguje na bázi lubrikantu, který vytváří přirozené a přátelské prostředí pro spermie na cestě k oplodnění vajíčka. Některé standardní lubrikační gely negativně ovlivňují a poškozují spermie, případně brání pohybu spermíí. Proto je potřeba se těmto gelům vyvarovat - zvláště během snahy o početí. Lubrikační gel FertilSafe PLUS zajistí využávání pH a ideální prostředí pro přirozené početí. Speciálně vytvořený gel na podporu početí chrání spermie, pozitivně ovlivňuje jejich pohyblivost a životaschopnost. Proto je vhodné a bezpečné ho používat v průběhu snahy o početí.

Jak používat FertilSafe PLUS?

FertilSafe PLUS může být aplikován před nebo během pohlavního styku a je vhodný pro každodenní použití. Dostatečné množství lubrikantu vytlačte z tuby přímo na prsty a aplikujte na povrch pánských genitálí /dovnitř dámských genitálí.

Důležité:

Obecné bezpečnostní pokyny:

- Skladujte při pokojové teplotě (4-30 °C).
- Nenechávejte tubu otevřenou bez víčka.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti - viz obal tuby.

Varování:

- FertilSafe PLUS není antikoncepce. Nepoškozuje spermie ani nezhoršuje funkci spermíí.
- Pokud se u Vás vyskytne podráždění, okamžitě přestaňte gel užívat. Pokud stav přetrívá vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte jej v případě aktivní vaginální infekce.
- Pokud jste v minulosti prošla vaginální operací, poradte se před použitím s lékařem.
- Používejte pouze podle uvedeného návodu.

Složení:

AQUA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, MARIS SAL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MAGNESIUM CHLORIDE

Balení obsahuje: FertilSafe PLUS 75 ml v tubě, kompletní návod k použití.

Výrobce: Research & Innovation centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Dovoz a distribuce: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Více informací: www.otehotnet.cz

NÁVOD NA POUŽITIE

Babystart FertilSafe PLUS® lubrikačný gél na podporu počatia 75 ml (Single pack)

Lubrikant, ktorý je bezpečný pre spermie a vhodný pre všetky páry ktoré sa snažia otehotniť.

- KLINICKY TESTOVANÝ
- VYVÁŽENÉ PH
- BEZ PARABÉNOV

FertilSafe PLUS bol vytvorený firmou Babystart Ltd., ktorá je jednou z popredných svetových poskytovateľov diagnostických zdravotníckych prostriedkov in vitro a doplnkov stravy pre podporu plodnosti. Naši odborníci vyvinuli lubrikačný gél FertilSafe PLUS špeciálne pre páry, ktoré sa snažia otehotniť. FertilSafe PLUS bol vyvinutý tak, aby napodobil prirodzené prostredie, ktorým spermie putujú na ceste k vajíčku. Zvyšuje komfort pri pohlavnom styku a pomáha tak pri oplodnení. FertilSafe PLUS bol klinicky testovaný, aby sa preukázalo, že nie je závadný pre spermie a splňa prísné pH testy a konzistenciu, ktorá chráni prirodzené prostredie pre bezpečie a životoschopnosť spermii.

Prosím prečítajte si tieto inštrukcie pred použitím.

Ako funguje FertilSafe PLUS?

FertilSafe PLUS funguje na báze lubrikantu, ktorý vytvára prirodzené a priateľské prostredie pre spermie na ceste k oplodneniu vajíčka. Niektoré štandardné lubrikačné gély negatívne ovplyvňujú a poškodzujú spermie, prípadne bránia pohybu spermii. Preto je treba sa týmto géjom vyvarovať – zvlášť pri snahe o počatie. Lubrikačný gél FertilSafe PLUS zaistí vyvážené pH a ideálne prostredie pre prirodzené počatie. Špeciálne vytvorený gél na podporu počatia chráni spermie, pozitívne ovplyvňuje ich pohyblivosť a životoschopnosť, preto je vhodné a bezpečné ho používať v priebehu snahy o počatie.

Ako používať FertilSafe PLUS ?

Môže byť aplikovaný pred alebo v počas pohlavného styku a je vhodný na každodenné použitie. Dostatočné množstvo lubrikantu vytlačte z tuby priamo na prsty a aplikujte na povrch pánskych genitálií/dovnútra dámskych genitálií.

Dôležité:

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

- Skladujte pri izbovej teplote (4-30 °C).
- Nenechávajte tubu otvorenú bez viečka.
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti – viď obal aplikátoru/tuby.

Varovanie:

- FertilSafe PLUS nie je antikoncepcia. Nepoškodzuje spermie ani nezhoršuje funkciu spermii.
- Pokiaľ sa u Vás vyskytne podráždenie, okamžite prestaňte gél užívať. Pokiaľ stav pretrváva vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte v prípade aktívnej vaginálnej infekcie.
- Pokiaľ ste v minulosti absolvovala vaginálnu operáciu, poraďte sa so svojím lekárom.
- Používajte iba podľa uvedeného návodu.

Zloženie:

AQUA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, MARIS SAL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MAGNESIUM CHLORIDE

Balenie obsahuje: FertilSafe PLUS 75ml v tube, kompletný návod na použitie.

Výrobca: Research & Innovation centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Dovoz a distribúcia: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Viac informácií: www.otehotnet.cz